

# HYALO GYN®

## Informazioni sul prodotto

L'epitelio vaginale è morbido ed elastico grazie ad un delicato equilibrio che mantiene il giusto livello di idratazione e lubrificazione.

In alcune fasi della vita (dopo il parto, durante l'allattamento, in menopausa), a seguito di certe terapie farmacologiche (contraccettivi orali), od in periodi di particolare stress questo delicato equilibrio viene alterato, inducendo uno stato di sofferenza, caratterizzato da secchezza vaginale, bruciore ed irritazione.

Il bruciore e l'irritazione, spesso associati a microlesioni dell'epitelio, sono causati dall'attrito provocato dalla mancata lubrificazione.

In questi casi, accanto ad un eventuale trattamento farmacologico specifico, è consigliabile l'utilizzo locale di un prodotto in grado di favorire l'idratazione della mucosa contribuendo a restituirle la naturale elasticità e morbidezza.

HYALO GYN® è un gel incolore con elevate proprietà idratanti che contiene Hydeal-D®, un estere dell'acido ialuronico. L'acido ialuronico è la molecola naturale responsabile del mantenimento del corretto livello di idratazione dei tessuti, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riparazione.

Hydeal-D® mantiene le caratteristiche di biocompatibilità e biointerattività dell'acido ialuronico, tipiche di una molecola che è già presente nei tessuti: ciò è garanzia di totale assenza di effetti collaterali.

La formulazione a base di Hydeal-D® garantisce una perfetta adesione alla mucosa vaginale, una prolungata azione idratante e favorisce i naturali processi di guarigione delle microlesioni causate dall'attrito.

## Composizione

Componente principale: Hydeal-D® 0,2% (estere dell'acido ialuronico)

Altri componenti: propilene glicole, carbomer, metile p-idrossibenzoato, propilene p-idrossibenzoato, sodio idrossido, acqua depurata.

## Indicazioni

Gel complementare al trattamento della secchezza vaginale di varia natura; coadiuvante del naturale processo di guarigione delle microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

## Modalità d'uso

1. Avvitare bene l'applicatore all'imboccatura del tubo.
2. Spremere il tubo e a riempire l'applicatore fino a quando il pistoncino si ferma.
3. Svitare l'applicatore dal tubo e, dopo aver provveduto ad un'adeguata igiene intima, inserire l'applicatore nella cavità vaginale, stando in posizione seduta o distesa sulla schiena.
4. Spingere lo stantuffo fino a provocare la fuoriuscita di tutto il gel.
5. Eliminare l'applicatore dopo l'uso
6. In caso di secchezza molto pronunciata è opportuno far fuoriuscire una piccola quantità di gel dalla cannula e lubrificare quest'ultima prima della sua introduzione



## **Frequenza di applicazione**

La frequenza di applicazione dipende dalle condizioni di secchezza della mucosa vaginale. Si raccomanda una applicazione ogni tre giorni per un periodo di trenta giorni, salvo diverso parere del Medico.

## **Controindicazioni**

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

## **Precauzioni ed avvertenze**

In caso di infezione vaginale l'uso del prodotto è a discrezione del medico.

Il prodotto può essere utilizzato anche durante il flusso mestruale e non influenza eventuali indagini ginecologiche.

Il prodotto può essere usato con i profilattici in lattice lubrificati e non lubrificati, in poliuretano e in "natural skin" lubrificati

Non usare contemporaneamente disinfettanti vaginali a base di sali di ammonio quaternario, come il benzalconio cloruro, che possono alterare l'acido ialuronico.

Gli applicatori sono monouso e devono essere gettati dopo l'uso. Se vengono riutilizzati, Fidia Farmaceutici non può garantire le loro prestazioni, funzionalità, o pulizia.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata in modo tale da compromettere l'integrità del tubo.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

## **Effetti Indesiderati**

Durante l'uso di prodotti per il trattamento della secchezza vaginale possono presentarsi perdite biancastre e inodori.

## **Conservazione**

Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

## **Confezione**

Astuccio contenente un tubo da 30g di gel e una busta sigillata con 10 applicatori monouso.

## **Fabbricante**

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - ITALY



Data dell'ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Febbraio 2013