

Come ordinare il Test: Registrarsi sul sito web www.biomoleculardiagnostic.com alla sezione Clienti e Ordini, oppure chiamare il Numero Verde **800 134 980**.

Modalità di prelievo: Consigliamo di effettuare il prelievo con la stessa metodica con la quale si applica l'assorbente interno. Introdurre il cotton fioc strofinandolo più volte lungo le pareti vaginali per 1 minuto, permettendogli di fare un piccolo giro interno sul fondo. Inserire poi il cotton fioc nell'apposita provetta.

Modalità di conservazione dei tamponi: Max 5 giorni a temperatura ambiente.

Modalità di spedizione dei campioni: Contattare il Numero Verde **800 134 980**.

Tempi di refertazione: 3 giorni lavorativi dall'arrivo del campione in laboratorio



50144 Firenze - via Nicola Porpora, 5
tel. +39 055 570 762 - fax +39 055 050 1112
info@biomoleculardiagnostic.com

www.biomoleculardiagnostic.com



**Genomica e metagenomica
per una medicina personalizzata**

*Infertilità?
Cistiti recidivanti?
Vaginiti?*

STOP!

Oggi c'è

VPT
Vaginal Path Test

La vagina è **lactobacillocentrica** caratterizzata dalla presenza, in diverse concentrazioni, di *Lactobacillus Crispatus*, *Lactobacillus Gasseri*, *Lactobacillus Jensenii* e *Lactobacillus Iners*.

Quando il *L. Crispatus* è dominante l'ecosistema è in equilibrio (Eubiosi).

L'alterazione di questo equilibrio comporta una diminuzione di *L. Crispatus* e l'attivazione - in concentrazioni diverse - degli altri lactobacilli, al fine di ristabilire l'eubiosi vaginale. A questa riduzione dei lactobacilli corrisponde un aumento dell'attività patogena, con conseguente maggiore suscettibilità alle malattie sessualmente trasmesse.

VPT full panel permette, con un semplice auto-prelievo vaginale completamente indolore, di identificare e quantificare **21 microrganismi**, fornendo un esatto quadro dei loro rapporti reciproci, ma soprattutto, attraverso l'analisi dei **4 Lactobacilli**, consente di determinare lo stato di salute della donna al fine - se necessario - di impostare una terapia mirata e tempestiva.



Perché usare il Vaginal Path Test-VPT?

VPT full panel è uno **strumento di diagnosi** per:

- Eubiosi vaginale
- Candida
- Vaginiti micotiche ed aerobiche
- Vaginosi
- Infezioni ricorrenti
- Malattie sessualmente trasmissibili
- Ulcere genitali e altre patologie vaginali

*N.B. Le infezioni genitali rappresentano
una delle cause principali di
infertilità femminile nella fascia
d'età 20 - 40 anni*

VPT full panel è rivolto a tutte le donne e, in particolare, a coloro che:

- Manifestano perdite vaginali anomale con o senza alterazione dell'odore, prurito, bruciori, dispareunia, o altra sintomatologia ginecologica, sia durante la vita riproduttiva che in menopausa;
- Hanno desiderio o difficoltà di concepimento;
- Hanno avuto rapporti sessuali non protetti e a rischio di malattie sessualmente trasmissibili.

VPT Full Panel evita l'**abuso degli antibiotici**, consentendo di associarli in maniera sapiente ai **probiotici**, al fine di ristabilire l'equilibrio dell'ecosistema.